

## Préparation des échantillons destinés pour le CUSM – SITE GLEN

**POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LA COLLECTE D'ÉCHANTILLONS ET SUR LEUR STABILITÉ, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU "RÉPERTOIRE DES ANALYSES DES LABORATOIRES CLINIQUES DES SITES CUSM" (VOIR 8B)**

### 1. TYPES DE TUBES APPROPRIÉS POUR LES SPÉCIMENS SANGUINS

\*Les spécimens sanguins doivent être demandé sur une **réquisition séparée** des spécimens d'urine\*



**Tube Primaire pour spécimens sanguins (BD ou GREINER)**



**Spécifications des tubes pour aliquots:**  
13 x 75mm Greiner Bio-One Vacuette  
Secondary Tube Multiplex PP  
Tube (500/sac): # Produit 2205255  
Couvert (500/sac): # Produit 2189241  
Ref #459000


**POUR LE LABORATOIRE CENTRAL SEULEMENT**

### 2. TYPES DE TUBES APPROPRIÉS POUR LES SPÉCIMENS D'URINE

\*Les spécimens d'urine doivent être fait sur une **réquisition différente** des tubes de sang et transportés dans un **contenant séparé**, maintenu à **4°C**\*  
\*Les requêtes pour le Laboratoire Central et la Microbiologie peuvent être faites sur la même réquisition mais doivent être envoyés dans 2 contenants séparés\*




**TUBES CONIQUES**  
Pour les **ANALYSES D'URINES**  
(Laboratoire central)

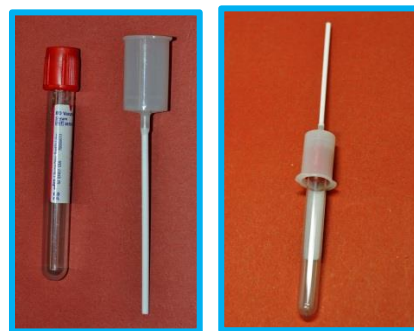

**TUBES ROUGES**  
Pour les **ANALYSES D'URINES DE BIOCHIMIE ET DES DROGUES URINAIRES** (Laboratoire central)


\*\*Les tubes à bout rouge doivent être remplis avec **une paille de transfert** pour assurer l'évacuation complète de l'air du tube.

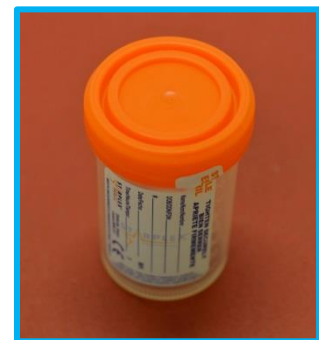

**CONTENANT STÉRILE**  
Pour **LES CULTURES D'URINES**  
(Microbiologie)

**POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LA COLLECTE D'ÉCHANTILLONS D'URINE ET SUR D'AUTRES SPÉCIMENS, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU "RÉPERTOIRE DES ANALYSES DES LABORATOIRES CLINIQUES DES SITES CUSM" (VOIR 8B)**

### 3. PLACEMENT APPROPRIÉ DE L'ÉTIQUETTE À CODE-BARRE

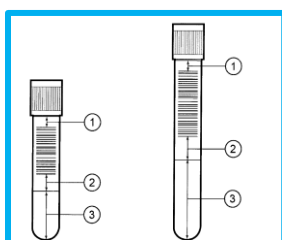

1. 5 mm minimum
2. 5 mm minimum
3. 3 mm minimum



**Non Acceptable:**

- Trop bas
- Trop haut
- De côté
- Courbée
- À l'envers

### 4. INFORMATIONS APPROPRIÉES SAISIÉS SUR LA RÉQUISITION ET SUR LE CONTENANT DU SPÉCIMEN

Référez-vous à la politique: **POL-01-MUHC-PC-000010**

*Identification des échantillons cliniques et critères pour acceptation et rejet*

### 5. ORGANISATION APPROPRIÉE DANS LA GLACIÈRE


\*Les Spécimens doivent être placés dans un support en ordre de correspondance aux réquisitions \*



**SUPPORT 36 PLACES (6x6), trous de 18mm :**

**Par Exemple:**

- Patient 1 (3 tubes): Positions 1-2-3
- Patient 2 (1 tube): Position 4
- Patient 3 (2 tubes): Position 5-6
- Patient 4 (3 tubes): Positions 7-8-9

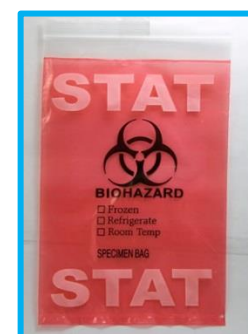

Les échantillons **URGENT** doivent être envoyés séparément dans un sac identifié **URGENT** avec la réquisition. Les spécimens **doivent être emballés séparément** et l'extérieur du contenant doit clairement être identifié comme **URGENT**.



**EXEMPLE:**

**Dans un envoi de spécimens de Microbiologie et du Laboratoire central:**

- 1 sac pour les spécimens du Laboratoire central
- 1 sac pour les réquisitions du Laboratoire central

- 1 sac pour les spécimens de la Microbiologie
- 1 sac pour les réquisitions de la Microbiologie



Les spécimens autres que du sang (urines, écouvillons, etc.) doivent être placés dans **des sacs individuels** avec la réquisition correspondante. (Les spécimens d'urine doivent être envoyés dans un contenant de transport maintenu à **4°C**, séparé des tubes de sang).

\* Les spécimens doivent être **séparés par laboratoire** et dans des sacs identifiés. Les spécimens peuvent être sécurisés en enroulant le sac sur lui-même et en l'insérant dans un élastique.

\* Les réquisitions doivent être dans un **sac séparé** dans le même ordre que les spécimens dans le support.

## 6. IDENTIFICATION APPROPRIÉ DES GLACIÈRES

### LES SPÉCIMENS DOIVENT ÊTRE ENVOYÉS DIRECTEMENT À LA RÉCEPTION CENTRALE

**Du lundi au vendredi, 08h00 – 16h00 (Sauf les jours fériés)**  
SPÉCIMENS DE ROUTINE ET URGENTS

CUSM – SITE GLEN  
Réception centrale, Laboratoires CUSM  
CS2.8166.1  
1001 Blvd Décarie  
Montréal, Québec  
H4A 3J1

### LES SPÉCIMENS DOIVENT ÊTRE ENVOYÉS DIRECTEMENT AU LABORATOIRE

**Du lundi au vendredi, 16h00 – 08h00**  
**Les fins de semaines et les jours fériés**  
SPÉCIMENS DE ROUTINE ET URGENTS

Laboratoire central	E04.3026
Banque de sang, Cellules-souches et HLA	E04.5026
Pathologie et Cytologie	E04.1417
Microbiologie	E05.3028-1
LCDM and Cytogénétiques	E05.3028-1

**LES SPÉCIMENS DE SANG FRAIS DOIVENT ÊTRE ENVOYÉS À TEMPÉRATURE DE LA PIÈCE.**  
**LES ÉCHANTILLIONS D'URINE DOIVENT ÊTRE ENVOYÉS SÉPARÉMENT À 4°C.**

#### URGENT

Les spécimens **URGENT** doivent être emballés séparément dans un contenant identifié clairement par une étiquette **rouge** (Urgent).

#### CYTOGÉNÉTIQUE


Les spécimens de **Cytogénétique** doivent être emballés séparément dans un contenant identifié clairement par une étiquette **verte** (Cytogénétiques).

#### PATHOLOGIE / CYTOLOGIE

Les spécimens de **Pathologie et de Cytologie** doivent être emballés séparément dans un contenant identifié clairement par une étiquette **bleue** (Pathologie/Cytologie).

#### LCDM

Les spécimens pour le **LCDM** (Laboratoire central de diagnostic moléculaire) doivent être emballés séparément dans un contenant identifié clairement par une étiquette **orange** (LCDM).

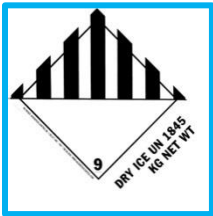

Les contenants de transport qui contiennent de la glace sèche doivent être clairement identifiés avec une étiquette **GLACE SÈCHE**.

**TOUS LES SPÉCIMENS DESTINÉS AU CENTRE NATIONAL DE RÉFÉRENCE EN PARASITOLOGIE (CNRP) DOIVENT ÊTRE EMBALLÉS SÉPARÉMENT ET ÊTRE ENVOYÉS DIRECTEMENT AU CNRP SITUÉ AU E03.5375. POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER LE CNRP (VOIR 8F).**

## 7. GLACIÈRES ET SPÉCIMENS INAPPROPRIÉS


\*Pour les bases de règlements de transport, veuillez vous référer au site internet de l'OPTMQ (voir 8d).



Les tubes de spécimens couverts avec de la paraffine, des papiers mouchoirs, des élastiques ou de multiples couches de sacs sont **inappropriés**.




Les tubes de spécimens qui ne sont pas en ordre dans les supports en correspondance aux réquisitions sont **inappropriés**.

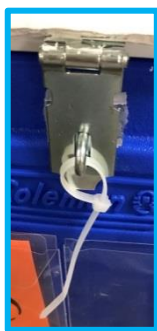

Les glacières de transport qui sont fermées par des attaches ZIP sont **inappropriées**.

Les contenants de transports peuvent être fermés avec des goupilles. Elles vous seront retournées avec vos contenants vides.

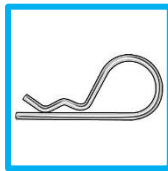

Les contenants de transport qui sont remplis à excès jusqu'au point de ne plus fermer sont **inappropriés**.

## 8. RÉFÉRENCES

- Laboratoires de biologie médicale CUSM (site web): <https://muhc.ca/laboratoires>
- Répertoire des analyses des laboratoires cliniques des sites CUSM (disponible sur le site web mentionné ci-dessus)
- CUSM - Laboratoire cliniques - Manuel d'orientation à la clientèle
- Pour toutes vos questions et demandes de renseignements, veuillez contacter les services à la clientèle des laboratoires cliniques CUSM

Téléphone: 514-934-1934, poste 35687  
Fax: 514-934-4457  
Courriel: [laboratoirescuscsm@muhc.mcgill.ca](mailto:laboratoirescuscsm@muhc.mcgill.ca)

- Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec (OPTMQ): <https://optmq.org/>
- Centre national de référence en parasitologie (CNRP): <https://www.mcgill.ca/tropmed/fr/cnarp>