

## PROCÉDURE DE FORMATION ET CERTIFICATION EN LIGNE : GLUCOMÈTRE

**Attention !!!** : Pour vous connecter au glucomètre utiliser uniquement le # de matricule CIUSSS à 5 caractères. Ne plus utiliser les anciens numéro d'employé. Si vous n'êtes pas un employé du CIUSSS, utilisez le code qui vous a été attribué personnellement par le laboratoire.

Pour renouveler votre certification annuelle vous devez réussir une certification annuelle en trois étapes :

1<sup>ère</sup> : Un examen à la suite d'une formation en ligne ou avec un super utilisateur

2<sup>ème</sup> : Un test de contrôle de qualité (CQ) avec les deux niveaux

3<sup>ème</sup> : Un test patient

### 1. Voie d'accès

Intranet : [Contenus et outils cliniques](#) > [Laboratoires](#) > [Accès au logiciel AegisPOC](#)

AegisPOC™

Hôpital Verdun-CHV 4 SUD

[Modifier le mot de passe](#) **CONNEXION**

Système de gestion d'information de la biologie délocalisée

- Mis en attente Patient Résultats
- Mis en attente Résultats de CQ
- Patient Commandes de tests Mis en attente

Alere



4.1


Mise à jour 2019-01-22


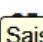
## 2. Identification



- Utiliser votre # de matricule à 5 caractères comme **identifiant**
- Utiliser votre # de matricule à 5 caractères comme **mot de passe**
- Sélectionner votre établissement et unité de soin.

Saisissez votre Identifiant d'opérateur ici.


 654321 





  Saisissez votre mot de passe ici.

 ..... 

Le même que l'identifiant

 Sélectionnez la combinaison Établissement – Unité de soins appropriée

 Hopital Verdun-CHV EV 

**CONNEXION**



### 3. Dans le menu de gauche aller dans POC

AegjisPOC™

**Statut**

- Patients
- Résultats
- CQ
- POC**
- Rapports
- Appareils
- Maintenance
- Opérateurs
- Localisation
- Paramètres
- Journal
- À propos de
- Soutien

**État du système**

**Résultats Patient** !

Mis en attente (Cette unité de soins)	0
Mis en attente (Toutes les unités de soins)	585
Nb total (dernières 24 heures)	862
Total des résultats Patient	1.360.892

**Localisation** ✓

Avec des résultats Mis en attente	93
Total des unités de soins actives	110

**Dispositifs/Appareils** ✓

Total actif	340
Actuellement connecté (15 min)	3
Non connecté (au cours des 15 dernières min)	337
Non connecté (au cours des dernières 24 heures)	191
Appareils avec avertissements	0

#### 4. Supports de formation

Ouvrir et consulter le document **Formation sur l'utilisation du FSPP\_laboratoire**  
FSPP : FreeStyle Precision Pro. Au besoin, vous pouvez imprimer le document.

**POC**

**Saisie du test manuel de Patient**

**Saisie du test manuel de contrôle qualité**

**Saisie du test manuel de compétence**

**Quiz et certifications**  
Passer le quiz  
[\[POC\\_Menu.MyCertsHyperlink\]](#)

**Supports de formation**  
[Manuel D'utilisation Formation sur l'utilisation du FSPP\\_laboratoire](#)

**Opérateur**  
Messages  
Modifier le mot de passe

## 5. Quiz et certifications

Sélectionner **Passer le quiz** après avoir révisé la formation. Une fois le quiz débuté vous ne pouvez plus revenir au document de formation.

 **POC**

---

 **Saisie du test manuel de Patient**

---

 **Saisie du test manuel de contrôle qualité**

---

 **Saisie du test manuel de compétence**

---

 **Quiz et certifications**  
[Passer le quiz](#)  
[POC\_Menu.MyCertsHyperlink] 

---

 **Supports de formation**  
[Manuel D'utilisation](#)  
[Formation sur l'utilisation du FSPP\\_laboratoire](#)

---

 **Opérateur**  
[Messages](#)  
[Modifier le mot de passe](#)

## 6. Sélectionner le quiz qui vous a été assigné et Passer le quiz.

**Quiz compétence**

Appareil ...  Certification ...

**Passer le Quiz** **Exporter**

	<input type="checkbox"/>	Nom du quiz	Nom de l'appareil	Type de certification	Nombre tentatives restantes	Date d'expiration de la certification	Dernier CQ de Niveau 1	Dernier CQ de niveau 2	Dernier CQ de niveau 3
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Glucomètre FSPP PrecXceedPro	Appareil		3	2018/11/01 23:59	2018/09/06 13:39		2018/09/06 13:39

Vous avez **3 tentatives** pour le réussir. Une fois le quiz réussi, il ne sera plus disponible sur la page.


**Le quiz comporte 10 questions à choix multiple dont 3 à réponses obligatoirement réussies. 8 réponses correctes sont nécessaires pour réussir le quiz, sauf lors d'échec à une question obligatoire.**

**En cas d'échec**, vous pouvez consulter le récapitulatif des questions pour une autocorrection. Les questions varient aléatoirement d'un utilisateur à l'autre et d'une tentative à l'autre.

Lors d'échec après 3 reprises communiquer avec nous au 514-362-1000, 62232 pour que le quiz vous soit réassigné.

## 7. Statut de certification

Pour obtenir le statut **Certifié** vous devez **réussir l'examen et exécuter correctement au moins un test de contrôle de qualité (CQ) niveau 1 et 2 et un test patient au cours des 12 derniers mois**. Lors que le statut **Non certifié** s'affiche dans le compte rendu de la certification, assurer vous de compléter les autres exigences de l'auto-certification avant que votre code ne soit expiré.

 **Quiz compétence**

**Vous avez répondu correctement à 10 questions sur 10. Vous avez réussi.**

[Imprimer certificat](#)

[Compte rendu de la certification \(Masquer\)](#)


**Statut de certification: Non Certifié**

Imprimer le certificat pour vos dossiers.

**Note importante** : Vous pouvez procéder aux étapes de certification dès que l'instrument affiche un message de péremption. Le logiciel réalise un processus d'auto-certification une fois par jour. Si vous avez complété les 3 étapes (quiz, CQ et test pt), attendez 24 heures pour la disparition du message de péremption. Télécharger le glucomètre pour faire une mise à jour du statut de certification. Si le message persiste, communiquer avec nous au 514-362-1000, 62232.

Pour reconduire un certificat d'utilisateur vous pouvez procéder via l'auto-certification en ligne à condition que votre code ne soit pas expiré. Il est recommandé de garder un **minimum de 10 jours** avant la péremption pour s'assurer de compléter toutes les étapes de l'auto-certification sans l'intervention d'un super-utilisateur ou du personnel de laboratoire. Référez-vous à un super-utilisateur ou au laboratoire si votre code est expiré (*Pas dans la liste des opérateurs*).

## 8. Déconnexion.

Assurez vous de vous déconnecter à la fin de votre session en cliquant sur l'icône de fermeture de session situé en haut à droite de l'écran  <sup>654321</sup> .

Natalia Rusu, biochimiste ADBD  
2018-09-07

Mise à jour 2019-01-22